

### Tamaños recomendados


#### Sencillo

ABS-4005  
ABS-4025  
ABS-4002  
ABS-4003  
ABS-4025  
ABS-4004



#### Compuesto

ABS-4052  
ABS-4051  
ABS-4050  
ABS-4053

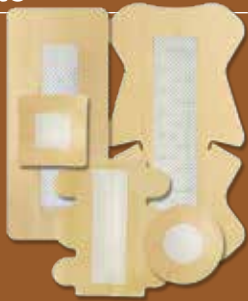

NOTA: para internaciones de más de 24 horas, se recomiendan los apósitos JumpStart® sencillos por su facilidad de control y recambio. Utilice gasa con una película semioclusiva para absorber el drenaje excedente y mantener los niveles de humedad necesarios. Antes de descartar el mismo, cámbielo por un apósito JumpStart compuesto para brindar protección adicional.

### Procedimientos para hombro

- Artroplastia total de hombro/inversa
- Mini abierto
- Portales para artroscopia


**Sencillo:**  
ABS-4005, ABS-4025, ABS-4002, ABS-4004  
**Compuesto:**  
ABS-4052, ABS-4051



### Procedimientos para mano

- Incisiones para fracturas

**Sencillo:**  
ABS-4005, ABS-4025, ABS-4002  
**Compuesto:**  
ABS-4052, ABS-4053

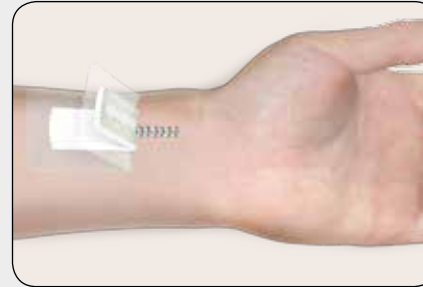

### Procedimientos para pie y tobillo

- Incisiones en el tendón de Aquiles
- Incisiones para inestabilidad lateral del tobillo
- Incisiones para juanetes

**Sencillo:**  
ABS-4005, ABS-4025, ABS-4002, ABS-4004  
**Compuesto:**  
ABS-4052, ABS-4051, ABS-4053



### Procedimientos de rodilla

- Artroplastia total de rodilla
- Artroplastia unicompartmental de rodilla
- Portales para artroscopia

**Sencillo:**  
ABS-4005, ABS-4002, ABS-4003,  
ABS-4004  
**Compuesto:**  
ABS-4052, ABS-4051, ABS-4050



### Apósito JumpStart sencillo

Tamaño del apósito (pulg.)	Tamaño del apósito (cm)	Cant./Caja	N.º producto Arthrex
1 x 1 Fenestrado	2,5 x 2,5 Fenestrado	10	ABS-4001
1,5 x 8	3,5 x 20	10	ABS-4005
1,5 x 10	3,5 x 25	10	ABS-4006
2 x 2	5 x 5	10	ABS-4002
2 x 5	5 x 12,5	10	ABS-4025
3 x 3	7,5 x 7,5	10	ABS-4003
4 x 4	10 x 10	10	ABS-4004
8 x 8	20 x 20	1	ABS-4008
12 x 12	30,5 x 30,5	1	ABS-4012

### Apósito JumpStart compuesto

Compuesto, Tamaño (pulg.)	Apósito, Tamaño (pulg.)	Compuesto, Tamaño (cm)	Apósito, Tamaño (cm)	Cant./Caja	N.º de producto Arthrex
2,5 de diámetro	1,0 de diámetro	6,0 de diámetro	2,5 de diámetro	10	ABS-4054
4,0 de diámetro	2,0 de diámetro	10 de diámetro	5,0 de diámetro	10	ABS-4056
4 x 4	2 x 2	10 x 10	5 x 5	5	ABS-4053
4,5 x 10	1,5 x 7	12,5 x 15	3,5 x 12,5	5	ABS-4051
5 x 6	1,5 x 5	11 x 25	3,5 x 17,5	5	ABS-4052
6 x 11,5	2 x 9	15 x 29	5 x 22,5	5	ABS-4050

### Instrucciones para apósito sencillo



Si fuera necesario, corte una forma de 1 cm a 2 cm más grande que los bordes de la herida (1/2 pulgada a 1 pulgada). *Precaución: al cortarlo, podría romperse el apósito.*



Humedezca el apósito JumpStart con solución salina estéril, agua o una capa pareja y delgada de hidrogel de agua (no incluido).




Aplique el apósito JumpStart con la cara punteada hacia abajo, en contacto directo con la herida.



Cubra el apósito JumpStart con otro apósito estéril secundario para ayudar a crear un entorno húmedo en la herida. La elección de los apósitos secundarios debe determinarse de acuerdo a la cantidad de exudados de la herida.

*La presente descripción de la técnica se brinda como una herramienta de capacitación y asistencia clínica para ayudar a los profesionales médicos matriculados en el uso de productos Arthrex® específicos. Como parte del uso profesional, los profesionales de la salud deben emplear su criterio profesional para tomar decisiones finales respecto al uso y técnica del producto. Al hacerlo, el profesional de la salud debe confiar en su propia capacitación y experiencia, y realizar un exhaustivo estudio de la bibliografía médica pertinente y de las instrucciones de uso del producto. El tratamiento postoperatorio es específico para cada paciente y depende de la evaluación del profesional tratante. Los resultados individuales varían y no todos los pacientes experimentan los mismos resultados o el mismo nivel de actividad postoperatoria.*

### Instrucciones para apósito compuestos

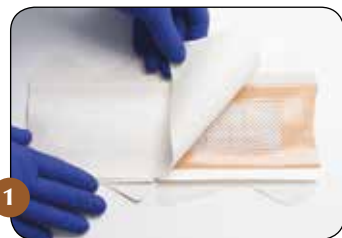

Desprenda el revestimiento central del apósito a fin de exponer la almohadilla JumpStart punteada y dejar los bordes en su lugar.



Humedezca la almohadilla JumpStart punteada con solución salina estéril, agua o una capa pareja y delgada de hidrogel de agua (no incluido).



Ubique la almohadilla JumpStart punteada sobre la herida y presione suavemente para asegurar un contacto directo.



Quite el revestimiento restante y alise el adhesivo contra la piel.

**Arthrex®**  
www.arthrex.com

Si desea información adicional, comuníquese con su representante local de Arthrex

Advanced Microcurrent Technology® es marca registrada de Vomaris Innovations, Inc.

© 2017 Arthrex, Inc. Todos los derechos reservados.

LR1-00016-ES\_C