

# PushLock® de 2,5 mm

## ÂNCORA DE SUTURA SEM NÓS



Reparo do LCU

Menor, mais resistente e sem nós...  
*SOLUÇÃO* para reparos em que há  
fixação de tecidos em ossos da mão  
e do punho



Reparo do  
ligamento  
escafolunar

Reparo do CFCT



Bio-PushLock  
com diâmetro e 2,5 mm

PushLock PEEK  
com diâmetro de 2,5 mm

Arthrex®

# Otimização de tensionamento e fixação

## ...sem nós, com a nova PushLock de 2,5 mm

Use um FiberWire® n.º 0 ou 2-0 para fazer um ponto no tendão ou ligamento e perfure ou puncione uma abertura no local desejado da inserção.


A Âncora de Sutura PushLock de 2,5 mm proporciona um meio seguro de fixação sem nós em procedimentos na mão e punho, bem como no pé e tornozelo. Com acomodação para dois fios de FiberWire 0 ou 2-0, esta âncora de duas peças permite um reparo sem perfil, rápido e direto.

A nova PushLock de 2,5 mm compreende uma aleta PEEK para colocar as suturas na parte inferior do orifício perfurado, permitindo ao cirurgião o tensionamento e travamento preciso das suturas com a impactação da peça Tak da âncora. Tanto a PushLock de PEEK radioluzente de alta resistência quanto a de PLLA absorvível de 2,5 mm otimizam a tensão e fixação dos tecidos, sem necessidade de amarrar nós.



Passa as extremidades da sutura pela aleta.

## Comparação de arrancamento\*

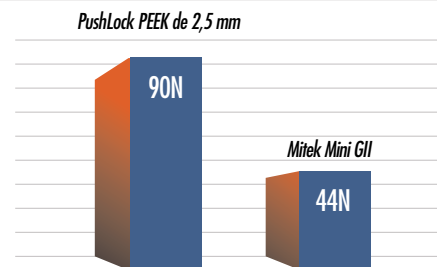

\*Dados em arquivo.


Empurre a ponta da aleta até o fundo do orifício, empurrando também as extremidades da sutura. Ajuste a tensão, uma sutura por vez, até que se atinja a tensão ideal.

## Implantes PushLock:

Mini Bio-PushLock de 2,5 mm x 8 mm AR-8825B  
Mini PEEK PushLock de 2,5 mm x 8 mm AR-8825P

## Instrumentação PushLock:

Kit de materiais descartáveis Mini Bio-SutureTak (punch descartável para osso osteopênico mole; brocas de 1,8 mm e 2 mm para osso mais duro; guia de perfuração) AR-1322DSC  
FiberWire n.º 2-0 de 18 pol. com agulha cilíndrica; 17,9 mm e circunferência de 3/8 AR-7220  
FiberWire n.º 0 de 38 pol. com agulha cilíndrica; 22,2 mm e 1/2 circunferência AR-7250

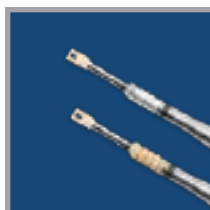

Tamanho real



PushLock de 2,5 mm

**Arthrex**®

[www.arthrex.com](http://www.arthrex.com)

...tecnologia atualizada a apenas um clique