

# Instrucciones para el ajuste del sistema de distracción de cadera (HDS)

Artroscopia de cadera



1  
Deslice las abrazaderas de mesa del HDS correspondientes por los rieles tipo Clark a cada lado de la camilla y ajústelos en su lugar.



2  
Fije la plataforma para paciente HDS (AR-6529-01) a las abrazaderas de mesa del HDS.



3  
Sujete la ranura de la plataforma para paciente HDS y tire hacia el lado a operar.



4  
Deslice la clavija de montaje de la plataforma para paciente HDS hacia el lado a operar.



5  
Coloque la almohadilla reversible de la plataforma para paciente HDS (AR-6529-02) sobre la plataforma para paciente HDS.



6  
Ajuste y sujete el adaptador del larguero para piernas HDS (AR-6529-15) a la parte inferior de las abrazaderas de mesa del HDS.



7  
Ajuste el larguero para piernas HDS (AR-6529-14) al adaptador del soporte de pierna.



8  
Ajuste el larguero para pierna a operar (AR-6529-05) a la plataforma para paciente HDS.



8a  
**Opcional:** Ajuste la mesa de preparación HDS opcional (AR-6529-03) a la plataforma para paciente HDS.



9  
Ajuste el poste perineal HDS (AR-6529-07) al lado a operar de la plataforma para paciente HDS.



10  
Coloque la almohadilla del poste perineal reutilizable HDS (AR-6529-08) con la cubierta de la almohadilla del poste perineal HDS (AR-6529-11) sobre el poste perineal HDS.



10a  
**Opcional:** Coloque la almohadilla para procedimientos sin postes (AR-6529-22) en la camilla de quirófano y sujétela con cintas de velcro cuando se realice un procedimiento de artroscopia de cadera sin postes.



11  
Sujete las botas de tracción del HDS (AR-6529-23) a los dos transportadores Teletrac.

## Instrucciones de instalación de la bota de tracción del HDS



1  
Coloque el pie dentro de la bota de tracción del HDS flexionada (AR-6529-23).



2  
Coloque la almohadilla interna sobre la parte superior de la espinilla e inserte la cinta superior de la bota en el trinquete de la almohadilla interna.



3  
Ajuste el trinquete hacia abajo para sujetar la almohadilla interna sobre el pie.



4  
Repita estos pasos para los otros tres trinquetes de la bota. No apriete los trinquetes en exceso y asegúrese de que siempre puede introducirse un dedo bajo la almohadilla interna entre la espuma azul y la almohadilla interna.



Arthrex

© 2023-07 Arthrex, Inc. Todos los derechos reservados. LR1-0369-es-NT\_C