


Hip Labral Scorpion™

Pasaje y recuperación simple de la sutura a través de un solo portal



Scorpion Labral para la cadera
AR-16991

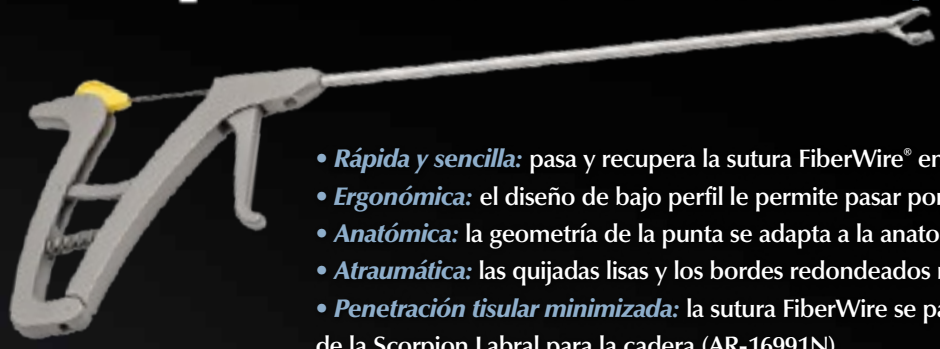

- **Rápida y sencilla:** pasa y recupera la sutura FiberWire® en un solo paso
- **Ergonómica:** el diseño de bajo perfil le permite pasar por una cánula de 8,25 mm
- **Anatómica:** la geometría de la punta se adapta a la anatomía de la articulación de la cadera
- **Atraumática:** las quijadas lisas y los bordes redondeados minimizan el daño iatrogénico
- **Penetración tisular minimizada:** la sutura FiberWire se pasa utilizando una aguja pequeña de la Scorpion Labral para la cadera (AR-16991N)



1
Cargue 1 a 2 pulgadas de FiberWire en el surco sobre la quijada superior y oprima el instrumento hasta que el FiberWire ingrese en la ranura de la aguja.



2
Muerda el labrum y apriete el mango para hacer avanzar la aguja y el FiberWire a través del tejido.



3
Retire la Scorpion del tejido con el FiberWire capturado en la quijada inferior. Para liberar la sutura, jale ambos extremos de la sutura y oprima el instrumento.

